



# Contour<sup>®</sup> plus ONE<sup>»</sup>

Sistem de monitorizare  
a glicemiei

Cum se folosește funcția  
**smartLIGHT** pe  
**CONTOUR®PLUS ONE**  
glucometrul inteligent



Întotdeauna consultați-vă cu medicul dumneavoastră înainte  
de a vă modifica tratamentul, dieta, sau activitatea fizică.



**Contour**  
**plus ONE**  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei



Funcția **smartLIGHT** vă oferă  
feedback imediat pentru  
glucoza din sânge.




Contour<sup>®</sup>  
plus **ONE**»  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei

[diabetes.ascensia.ro](http://diabetes.ascensia.ro)

1.

## Funcția **smartLIGHT**

După ce v-ați măsurat glucoza din sânge și dacă setarea Indicator țintă este activată, indicatorul luminos al benzii de testare afișează o culoare care reprezintă valoarea rezultatului comparată cu Intervalul țintă Înainte de masă, După masă sau General.

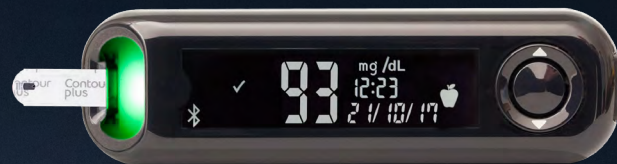

Contour<sup>®</sup>  
plus **ONE**»  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei

diabetes.ascensia.ro



2.

## Funcția **smartLIGHT**

Dacă rezultatul glucozei din sânge este în țintă, funcția smartLIGHT este verde și glucometrul emite un sunet.

În țintă



Contour<sup>®</sup>  
plus **ONE**»  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei

[diabetes.ascensia.ro](http://diabetes.ascensia.ro)

3.

### Funcția smartLIGHT

Dacă rezultatul glucozei din sânge este sub țintă, funcția smartLIGHT este roșie și glucometrul emite un sunet.

Sub țintă



Contour<sup>®</sup>  
plus **ONE**»  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei

diabetes.ascensia.ro



4.

## Funcția smartLIGHT

Dacă rezultatul glucozei din sânge este deasupra țintei, funcția smartLIGHT este galbenă și glucometrul emite un sunet.

Deasupra țintei




Contour<sup>®</sup>  
plus **ONE**»  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei

diabetes.ascensia.ro

5.

## Funcția smartLIGHT

Dacă nu ați selectat un Indicator de masă, funcția smartLIGHT va indica rezultatul glucozei din sânge comparat cu Intervalul țintă general.

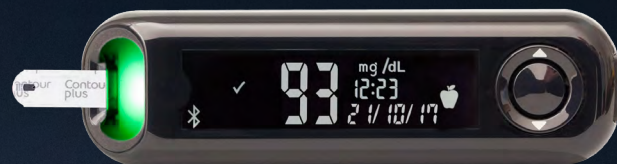

Contour<sup>®</sup>  
plus **ONE**»  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei

diabetes.ascensia.ro



Dacă aveți întrebări legate de glucometrul inteligent **CONTOUR®PLUS ONE**, sau de aplicația **CONTOUR®DIABETES**, discutați cu medicul dumneavoastră și consultați ghidul utilizatorului.

Pentru mai multe informații și pentru a afla dacă aceste produse sunt disponibile în țara dumneavoastră vizitați [diabetes.ascensia.com](http://diabetes.ascensia.com)




Întotdeauna consultați-vă cu medicul dumneavoastră înainte de a vă modifica tratamentul, dieta, sau activitatea fizică.



Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. App Store este marca de servicii a Apple Inc. Marca cuvântului și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., și orice utilizare a unor astfel de mărci se face în baza unei licențe. Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc. Ascensia, sigla Ascensia Diabetes Care și CONTOUR sunt mărci comerciale ale Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Data pregătirii: Februarie 2018. Cod: G.DC.12.2017.52587

© Copyright 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG

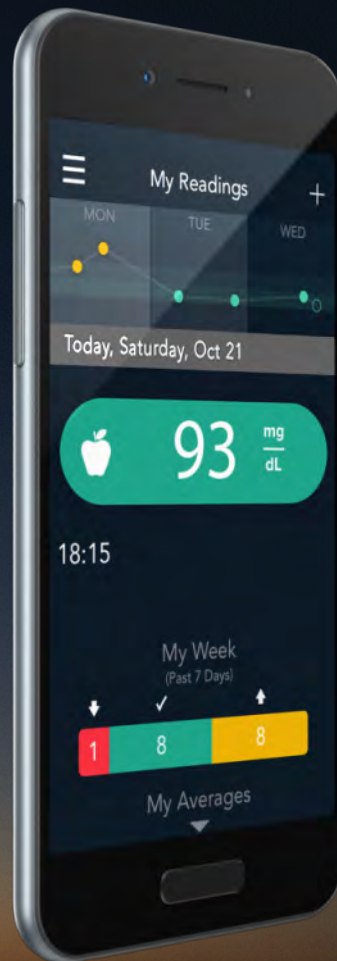

Contour  
plus **ONE**  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei

[diabetes.ascensia.ro](http://diabetes.ascensia.ro)



# Contour<sup>®</sup>

diabetes solutions