



# Contour<sup>®</sup> plus ONE<sup>»</sup>

Sistem de monitorizare  
a glicemiei

Folosind **Tiparele mele**  
cu aplicația  
**CONTOUR®DIABETES**




Întotdeauna consultați-vă cu medicul dumneavoastră înainte de a vă modifica tratamentul, dieta, sau activitatea fizică.



Contour®  
plus **ONE**»  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei

Funcția **Tiparele mele** identifică tipare și tendințe specifice ale măsurătorilor glicemiei și vă notifică anumite cauze posibile.

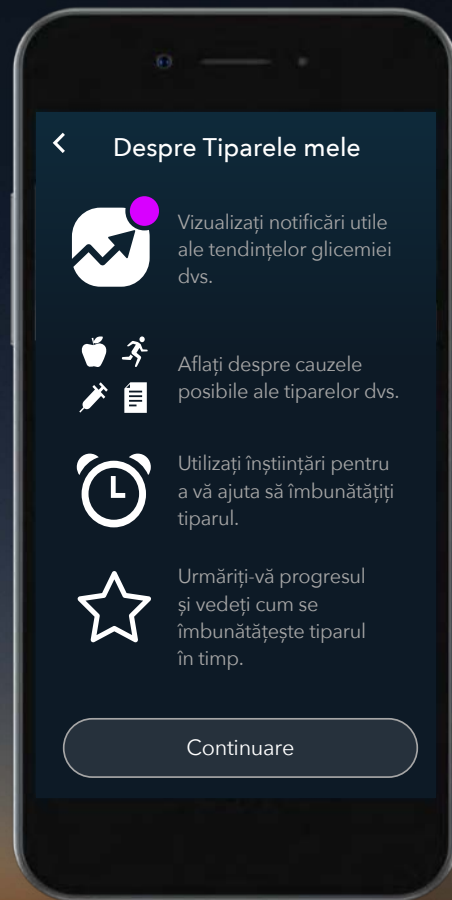

Contour<sup>®</sup>  
plus **ONE**»  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei


Funcția **Tiparele mele** identifică tipare și tendințe specifice ale măsurătorilor glicemiei și vă notifică anumite cauze posibile.



Contour<sup>®</sup>  
plus **ONE**»  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei

## 1. **Tiparele mele**

Alegeți **Tiparele mele** din Meniul principal

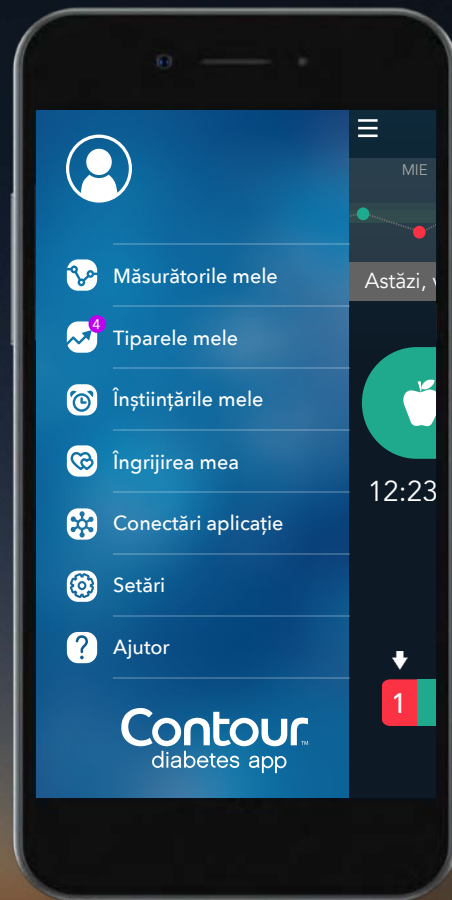

**Contour<sup>®</sup>**  
**plus ONE<sup>»</sup>**  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei

## 2. Plan de Înștiințare de Testare

Ecranul Tiparele mele va afișa tiparele pentru care ați ales să fiți notificat.

Un tipar necitit este marcat cu un cerc violet.



**Contour<sup>®</sup>**  
**plus ONE<sup>»</sup>**  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei

## 2. Plan de Înștiințare de Testare


Atingeți **Mai multe** pentru a schimba selecția tiparului, sau pentru a revizui istoricul tiparului.



Contour<sup>®</sup>  
plus **ONE**»  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei

### 3. **Tiparele mele**

Atingeți **Selectare Tipar** pentru a alege tiparele pentru care doriți să fiți notificat.

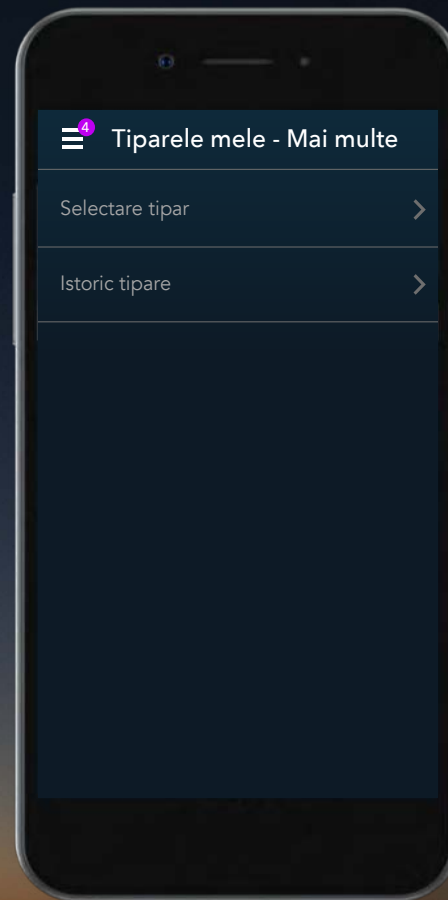


Contour<sup>®</sup>  
plus **ONE**»  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei



### 3. **Tiparele mele**

Atingeți **Selectare Tipar** pentru a alege tiparele pentru care doriți să fiți notificat.

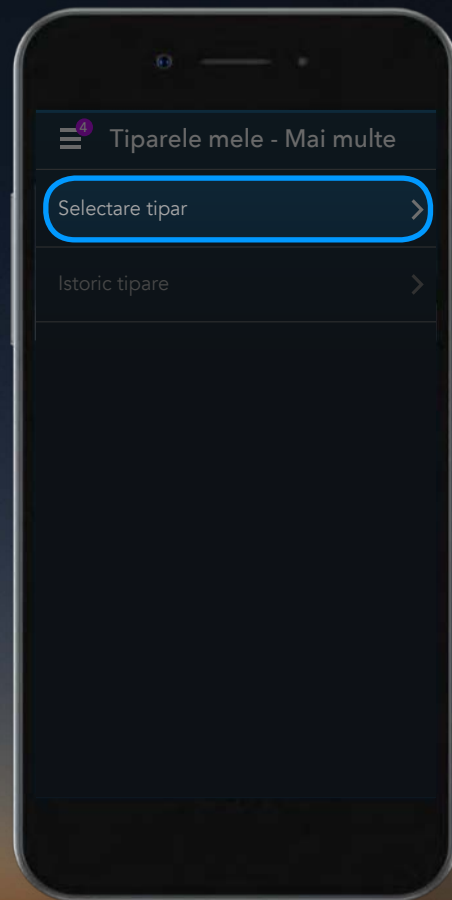

Contour<sup>®</sup>  
plus **ONE**»  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei

### 3. Tiparele mele

Atingeți **Selectare Tipar** pentru a alege tiparele pentru care doriți să fiți notificat.



Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>»</sup>  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei

### 3. Tiparele mele

Atingeți **Selectare Tipar** pentru a alege tiparele pentru care doriți să fiți notificat.



Contour<sup>®</sup>  
plus **ONE**»  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei

#### 4. **Tiparele mele**

Oricare tipar a fost detectat va fi listat pe ecranul **Tiparele mele**.

Ecranul **Tiparele mele** va afișa tiparele pentru care ați ales să fiți notificat. Un tipar necitit este marcat cu un cerc violet.



## 4. Tiparele mele

Puteți vedea detalii ale tiparului și afla mai mult despre cauzele posibile




Aflați mai multe

Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>»</sup>  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei

## 4. Tiparele mele


Puteți afla mai multe despre cauza unui tipar și puteți alege dintre cauzele posibile cum ar fi alimentația, medicația sau activitatea fizică.

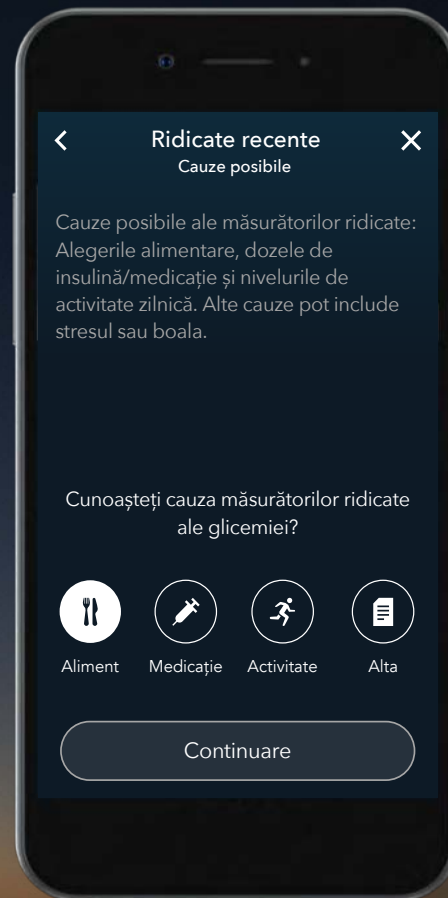

Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>»</sup>  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei

#### 4. **Tiparele mele**


Puteți de asemenea seta o înștiințare cu privire la o posibilă cauză.

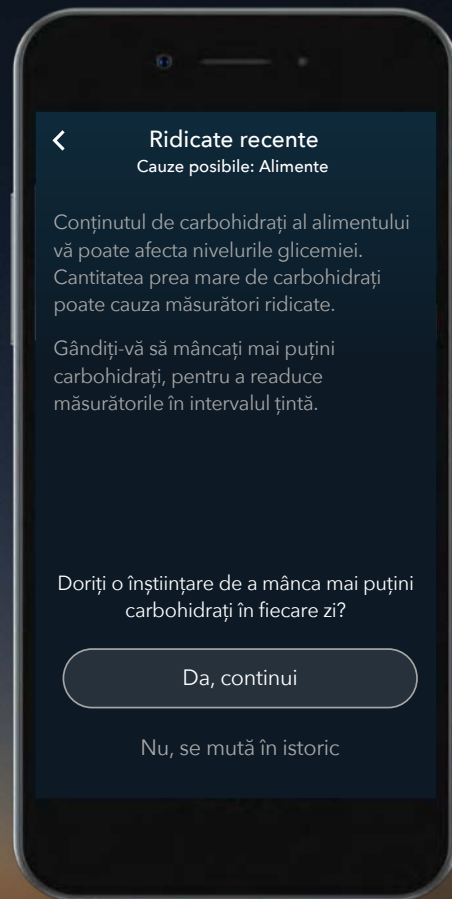

Contour<sup>®</sup>  
plus **ONE**»  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei

## 5. Tiparele mele

Oricând puteți să vă întoarceți la un tipar în **Istoric Tipare**

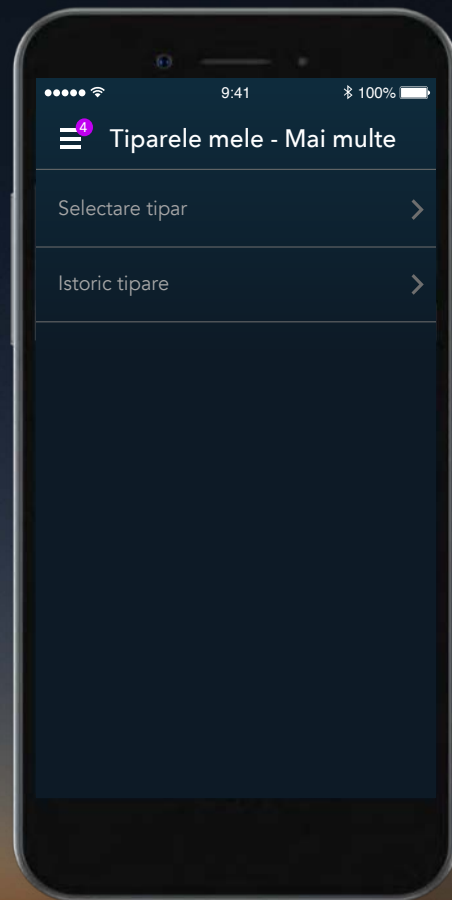


Contour<sup>®</sup>  
plus **ONE**»  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei



## 5. Tiparele mele


În **Istoric Tipare** puteți revedea tiparele detectate în trecut și care nu mai sunt active.

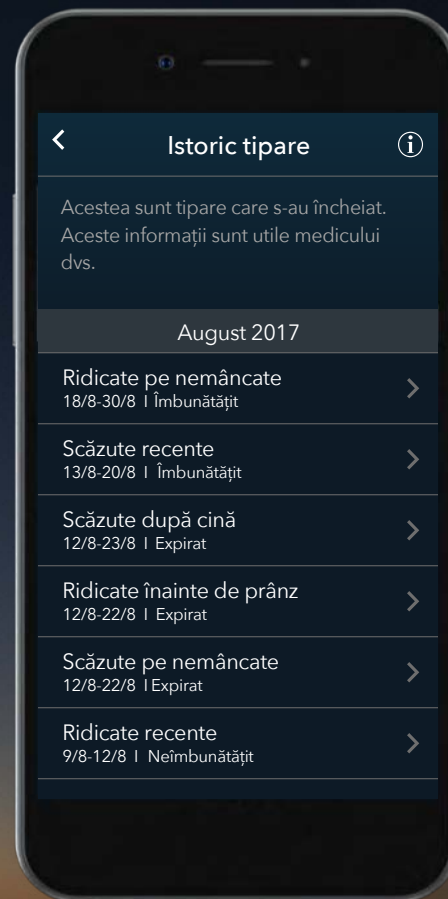

Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>»</sup>  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei

## 5. Tiparele mele

În **Istoric Tipare** puteți revedea tiparele detectate în trecut și care nu mai sunt active.

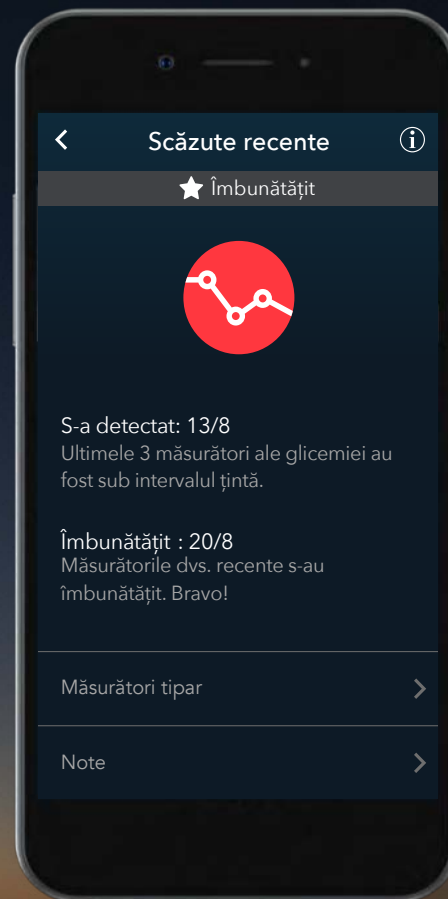

Contour<sup>®</sup>  
plus **ONE**»  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei

Dacă aveți întrebări legate de glucometrul inteligent **CONTOUR®PLUS ONE**, sau de aplicația **CONTOUR®DIABETES**, discutați cu medicul dumneavoastră și consultați ghidul utilizatorului.

Pentru mai multe informații și pentru a afla dacă aceste produse sunt disponibile în țara dumneavoastră vizitați [diabetes.ascensia.com](http://diabetes.ascensia.com)



Întotdeauna consultați-vă cu medicul dumneavoastră înainte de a vă modifica tratamentul, dieta, sau activitatea fizică.

Optați pentru aplicație



Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. App Store este marca de servicii a Apple Inc. Marca cuvântului și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., și orice utilizare a unor astfel de mărci se face în baza unei licențe. Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc. Ascensia, sigla Ascensia Diabetes Care și CONTOUR sunt mărci comerciale ale Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Data pregătirii: Februarie 2018. Cod: G.DC.10.2017.52578

© Copyright 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG



**Contour®**  
**plus ONE**»  
Sistem de monitorizare  
a glicemiei

[diabetes.ascensia.com](http://diabetes.ascensia.com)



# Contour<sup>®</sup>

diabetes solutions