

The logo for Contour Plus ONE is centered on the page. 'Contour' is in white, 'plus' is in white, and 'ONE' is in a bold teal color with a double right-pointing arrow as a superscript. Below the main text is the Romanian phrase 'Sistem de monitorizare a glicemiei' in a smaller white font.

ContourTM plus ONE[»]

Sistem de monitorizare
a glicemiei

Cuplarea glucometrului
dumneavoastră inteligent
CONTOUR™ PLUS ONE
cu aplicația
CONTOUR™ DIABETES



Contour™
plus **ONE**»
Sistem de monitorizare
a glicemiei

Cuplați glucometrul dumneavoastră
CONTOUR™ PLUS ONE și se va sincroniza
cu aplicația **CONTOUR DIABETES** ori de câte
ori o conexiune Bluetooth® este disponibilă




Contour™
plus **ONE**»
Sistem de monitorizare
a glicemiei

1.

Cuplarea glucometrului

Înainte de a cupla glucometrul **CONTOUR PLUS ONE**, activați Bluetooth® la dispozitivul mobil.

Mergeți la 'Setări' și apoi la 'Bluetooth®' și atingeți butonul de activare Bluetooth®.

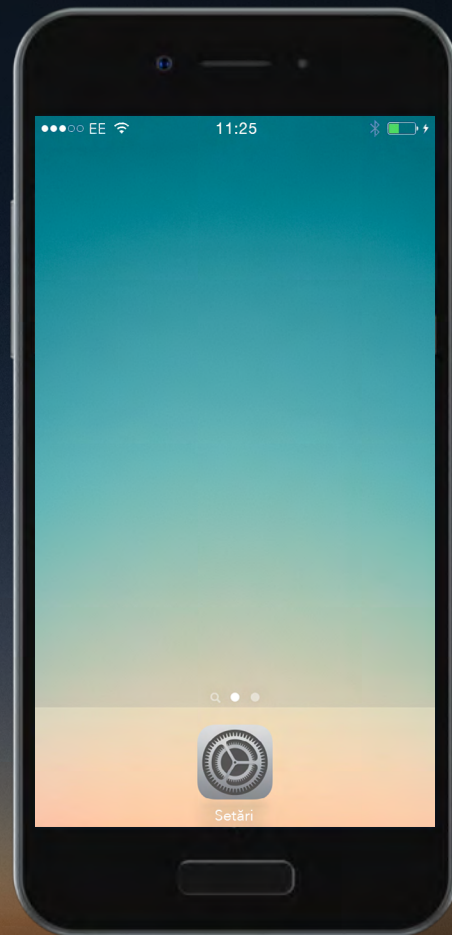


ContourTM
plus ONE
Sistem de monitorizare
a glicemiei

1.

Cuplarea glucometrului

Înainte de a cupla glucometrul **CONTOUR PLUS ONE**, activați Bluetooth® la dispozitivul mobil.

Mergeți la 'Setări' și apoi la 'Bluetooth®' și atingeți butonul de activare Bluetooth®.

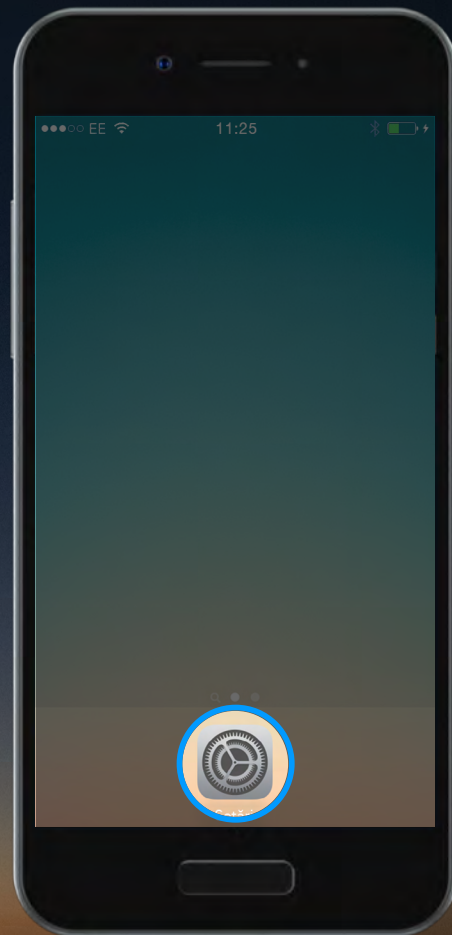


ContourTM
plus **ONE**»
Sistem de monitorizare
a glicemiei

1.

Cuplarea glucometrului

Înainte de a cupla glucometrul **CONTOUR PLUS ONE**, activați Bluetooth® la dispozitivul mobil.

Mergeți la 'Setări' și apoi la 'Bluetooth®' și atingeți butonul de activare Bluetooth®.

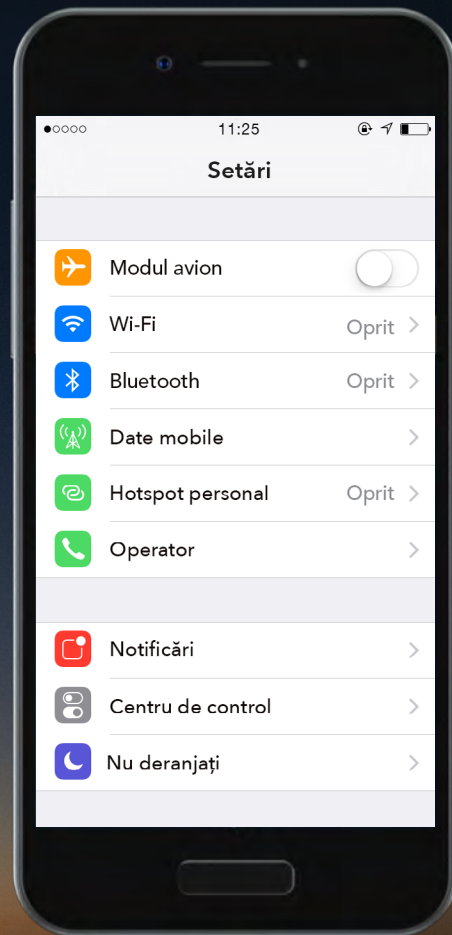


Contour
plus ONE
Sistem de monitorizare
a glicemiei

1.

Cuplarea glucometrului

Înainte de a cupla glucometrul **CONTOUR PLUS ONE**, activați Bluetooth® la dispozitivul mobil.

Mergeți la 'Setări' și apoi la 'Bluetooth®' și atingeți butonul de activare Bluetooth®.

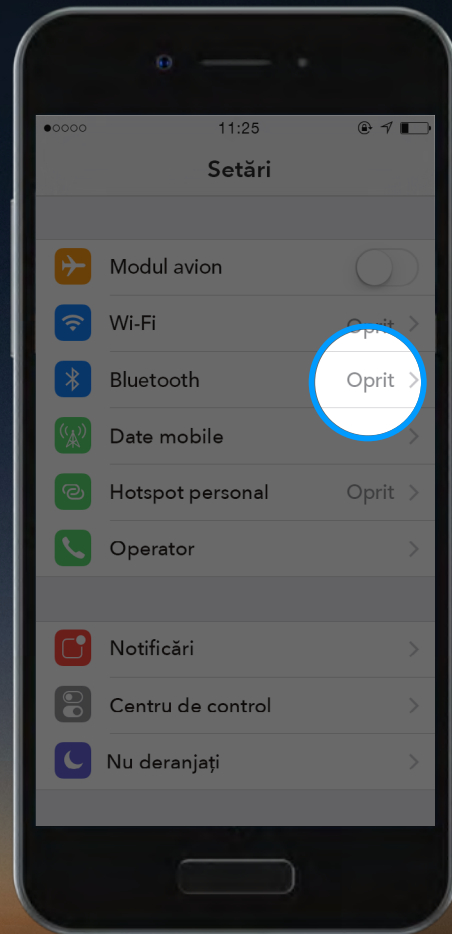


Contour
plus ONE
Sistem de monitorizare
a glicemiei

1.

Cuplarea glucometrului

Înainte de a cupla glucometrul **CONTOUR PLUS ONE**, activați Bluetooth® la dispozitivul mobil.

Mergeți la 'Setări' și apoi la 'Bluetooth®' și atingeți butonul de activare Bluetooth®.

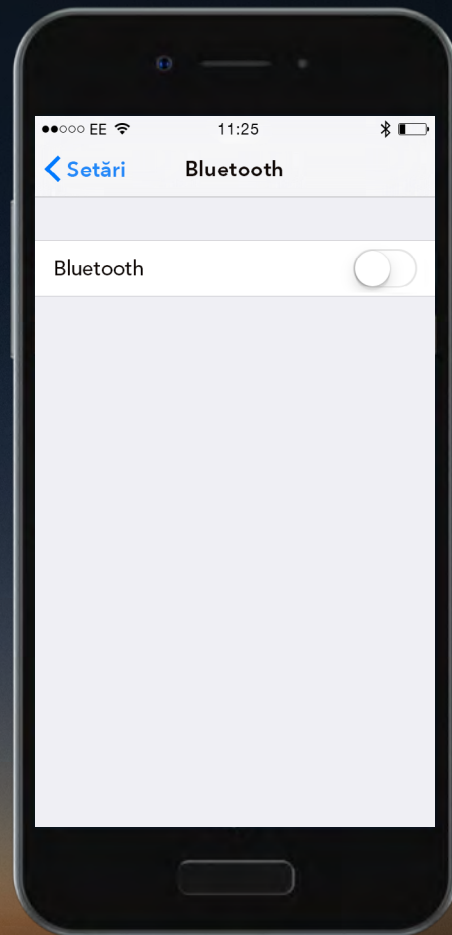


ContourTM
plus **ONE**»
Sistem de monitorizare
a glicemiei

1.

Cuplarea glucometrului

Înainte de a cupla glucometrul **CONTOUR PLUS ONE**, activați Bluetooth® la dispozitivul mobil.

Mergeți la 'Setări' și apoi la 'Bluetooth®' și atingeți butonul de activare Bluetooth®.

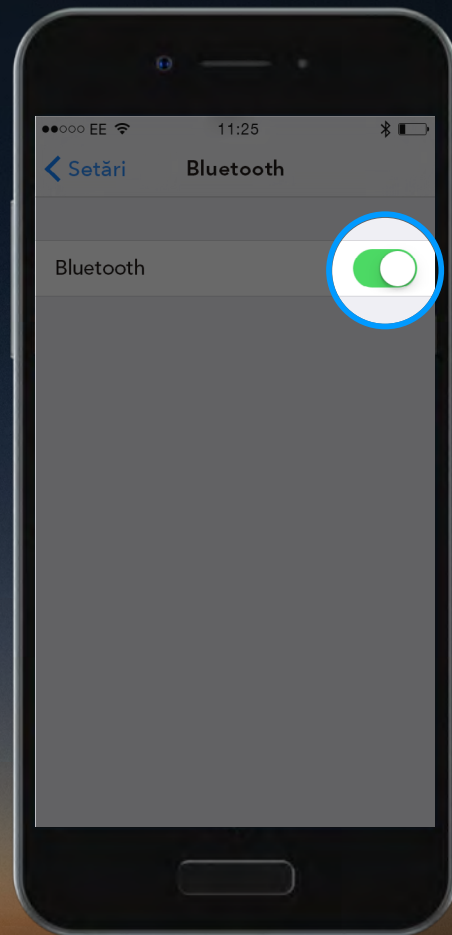

ContourTM
plus **ONE**»
Sistem de monitorizare
a glicemiei

2.

Cuplarea glucometrului

În aplicația **CONTOUR DIABETES**, după ce ați configurat un cont vi se va cere să cuplați un glucometru.

Acum sunteți gata de a cupla glucometrul dumneavoastră. Închideți glucometrul și plasați-l aproape de dispozitivul mobil.

Selectați '**Continuare**'.



ContourTM
plus ONE
Sistem de monitorizare
a glicemiei

2.

Cuplarea glucometrului

În aplicația **CONTOUR DIABETES**, după ce ați configurat un cont vi se va cere să cuplați un glucometru.

Acum sunteți gata de a cupla glucometrul dumneavoastră. Închideți glucometrul și plasați-l aproape de dispozitivul mobil.

Selectați '**Continuare**'.




ContourTM
plus ONE
Sistem de monitorizare
a glicemiei

3.

Cuplarea glucometrului

Apăsați și țineți apăsat butonul central al glucometrului **CONTOUR PLUS ONE** și nu îl eliberați până nu observați o lumină albastră care clipește intermitent la nivelul portului bandetei de testare.

Selectați '**Continuare**'.

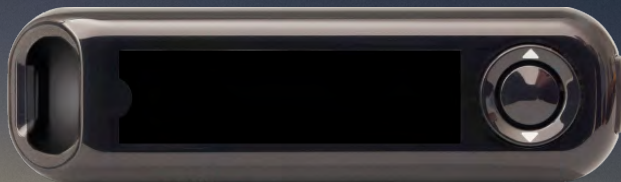

ContourTM
plus ONE
Sistem de monitorizare
a glicemiei

3.

Cuplarea glucometrului

Apăsați și țineți apăsat butonul central al glucometrului **CONTOUR PLUS ONE** și nu îl eliberați până nu observați o lumină albastră care clipește intermitent la nivelul portului bandetei de testare.

Selectați '**Continuare**'.



ContourTM
plus ONE
Sistem de monitorizare
a glicemiei

3.

Cuplarea glucometrului

Apăsați și țineți apăsat butonul central al glucometrului **CONTOUR PLUS ONE** și nu îl eliberați până nu observați o lumină albastră care clipește intermitent la nivelul portului bandetei de testare.

Selectați '**Continuare**'.



ContourTM
plus ONE
Sistem de monitorizare
a glicemiei

3.

Cuplarea glucometrului

Apăsați și țineți apăsat butonul central al glucometrului **CONTOUR PLUS ONE** și nu îl eliberați până nu observați o lumină albastră care clipește intermitent la nivelul portului bandetei de testare.

Selectați '**Continuare**'.



ContourTM
plus ONE
Sistem de monitorizare
a glicemiei


4.

Cuplarea glucometrului

Selectați numărul de serie al glucometrului dumneavoastră.

Găsiți numărul de serie pe eticheta de pe spatele glucometrului dumneavoastră.

Selectați 'Continuare'.

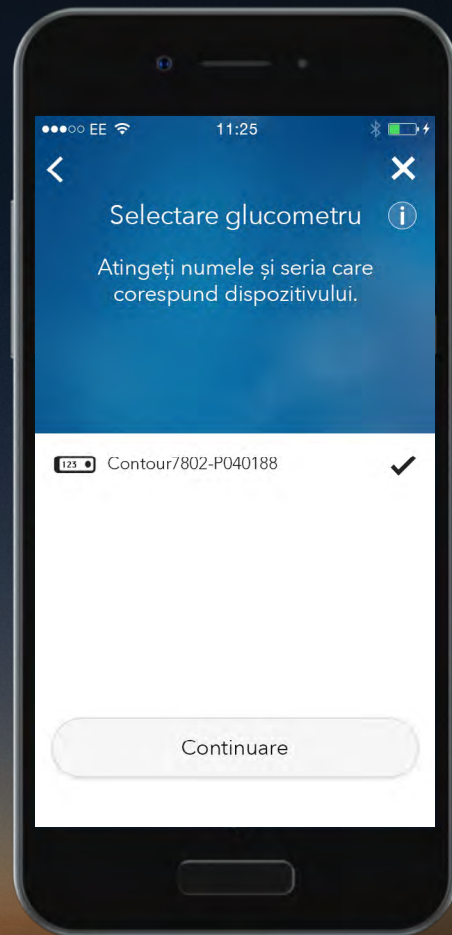

ContourTM
plus ONE[»]
Sistem de monitorizare
a glicemiei


4.

Cuplarea glucometrului

Selectați numărul de serie al glucometrului dumneavoastră.

Găsiți numărul de serie pe eticheta de pe spatele glucometrului dumneavoastră.

Selectați 'Continuare'.

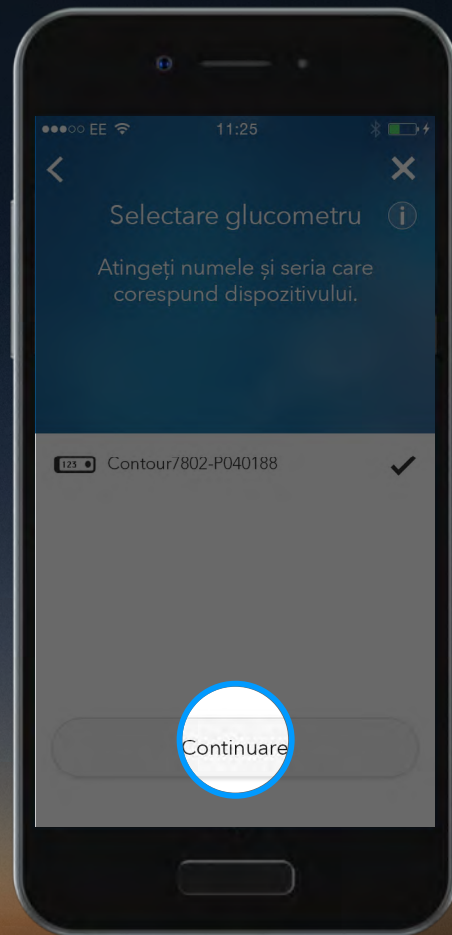


ContourTM
plus ONE[»]
Sistem de monitorizare
a glicemiei

5.

Cuplarea glucometrului

Aplicația **CONTOUR DIABETES**
se va conecta acum la glucometru

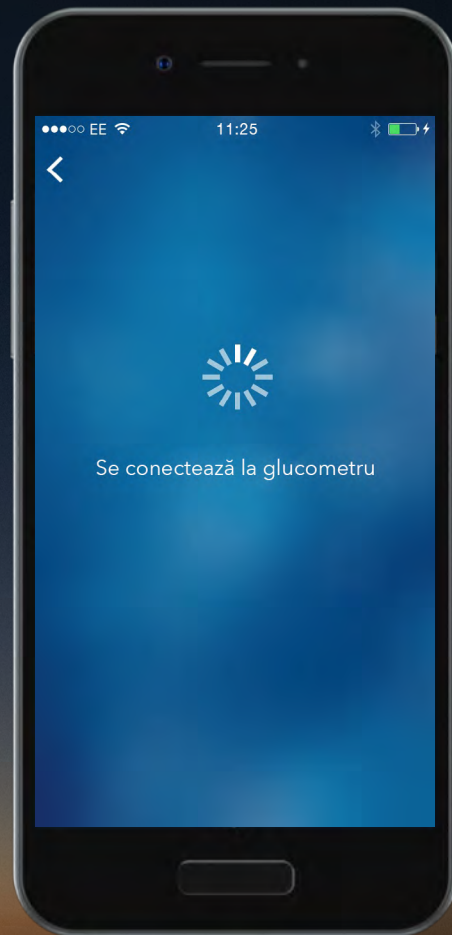

ContourTM
plus ONE[»]
Sistem de monitorizare
a glicemiei

6.

Cuplarea glucometrului

Selectați 'Cuplare' pentru a confirma cererea de cuplare.



ContourTM
plus **ONE**[»]
Sistem de monitorizare
a glicemiei

6.

Cuplarea glucometrului

Selectați 'Cuplare' pentru a confirma cererea de cuplare.




ContourTM
plus **ONE**»
Sistem de monitorizare
a glicemiei

6.

Cuplarea glucometrului

Selectați 'Cuplare' pentru a confirma cererea de cuplare.

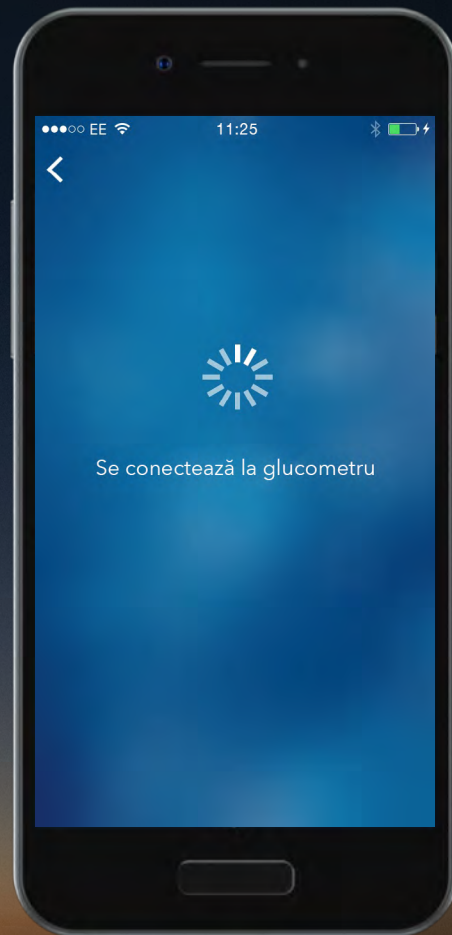


ContourTM
plus **ONE**»
Sistem de monitorizare
a glicemiei

7.

Cuplarea glucometrului

Imediat ce glucometrul s-a cuplat selectați 'Continuare'.

Acum puteți configura aplicația **CONTOUR DIABETES**.

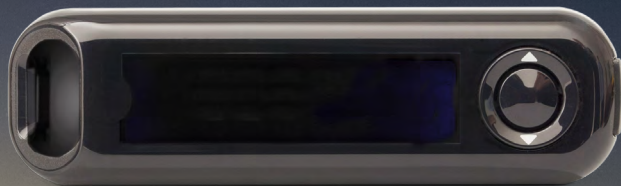


ContourTM
plus **ONE**
Sistem de monitorizare
a glicemiei

7.

Cuplarea glucometrului

Imediat ce glucometrul s-a cuplat selectați 'Continuare'.

Acum puteți configura aplicația **CONTOUR DIABETES**.

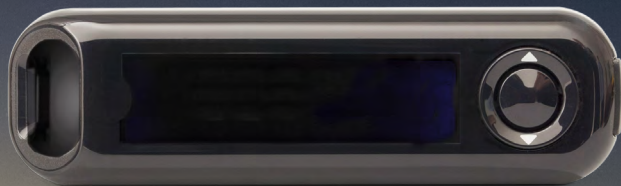


**ContourTM
plus ONE[»]**
Sistem de monitorizare
a glicemiei

Dacă aveți întrebări legate de glucometrul inteligent **CONTOUR™PLUS ONE**, sau de aplicația **CONTOUR™DIABETES**, discutați cu medicul dumneavoastră și consultați ghidul utilizatorului.

Pentru informații suplimentare și pentru a afla dacă glucometrul **CONTOUR™PLUS ONE** este disponibil în țara dumneavoastră vizitați diabetes.ascensia.com



Optați pentru aplicație

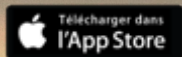

Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. App Store este marca de servicii a Apple Inc. Google Play este o marcă comercială a Google Inc.

Ascensia, sigla Ascensia Diabetes Care și CONTOUR sunt mărci comerciale ale Ascensia Diabetes Care Holdings AG.



**Contour™
plus ONE»**
Sistem de monitorizare
a glicemiei

